

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科適合試験用材料 70881000


オムニバイト

【形状・構造及び原理等】

概要：液体の入った枕状の材料で、咬合面に介在させることで、咬合による適合性を確認する。

構造：液体の入った薄い枕状の材料である。

<構造図>

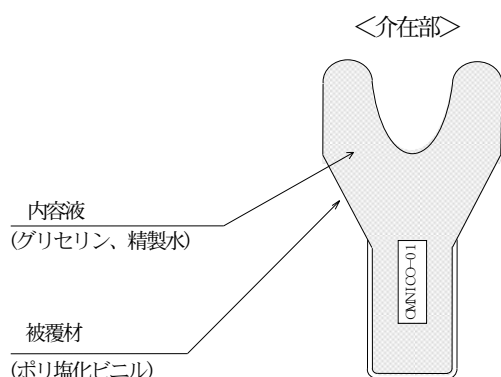

【使用目的、効能又は効果】

上下顎の総義歯等において、フィットチェッカー等を義歯内面に塗布し、装着させた後、オムニバイトを介在させ、咬合させて、人工歯の影響を受けずに上顎義歯及び下顎義歯の個々の適合状態を確認する。

【品目仕様等】

項目	品目仕様
荷重試験	5 N

* 【操作方法又は使用方法等】

- 使用前に、必ず洗浄・消毒（イルガサン、ヒビテン等による薬液消毒のみ）をおこなってください。
- 使用用途により、以下のとおり使用してください。
 - 義歯による口腔粘膜の痛み（あたり）の要因の判断に使用する場合
 - 上下顎の総義歯等に、フィットチェッカー等を義歯内面に塗布し、装着させる。
 - 本品を上下顎の総義歯等に介在させる。
 - 本品を咬合させた際の、あたりの違和感の有無を患者に確認し、以下の技工作業をおこなってください。

あたりの違和感がある場合…直接義歯の内面があたっているため、義歯内面を削って下さい。

あたりの違和感がない場合…咬合関係がよくないので咬合調整又は、再配列をおこなって下さい。
- 義歯の保持等に使用する場合
ティッシュコンディショナーやリベース材の使用に際して本品を介在させ、咬合させて下さい。
本品を使用することにより、義歯と粘膜面の正しい適合状態を確認することが出来ます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 準備
 - 毎回使用前にあらかじめ手で加圧し、液漏れが生じていないかを必ず確認してから使用すること。
 - 取扱いについて：
 - 鋭利なインスツルメント等により本品が破損する恐れがあるので取扱いには十分注意すること。
 - 使用頻度、経時によるが、変色（主に黄変）し始めると樹脂が劣化の傾向にあり、破損や接着部の裂け、等が生じ易くなり、製品の寿命と考えられるので十分注意すること。

【使用上の注意】

- 使用注意
 - 本品を使用する際はビニール材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症が無いことを確認すること。
 - 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。
 - 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接触れないようにすること。また、使用により過敏症状を起こした際には使用を中止し、直ちに医師の診断を受けること。
- 重要な注意事項
 - 万一本品が患者の口腔内で破損し、内容液を飲み込んでしまった場合、多量の水を飲ませること。また、皮膚に付着したり目に入った場合には多量の水で洗い流すこと。
 - イルガサン、ヒビテン等を用いた薬液消毒のみおこない、それ以外の消毒はおこなわないこと。
 - 破損する恐れがあるため、本品に衝撃を与えないこと。
 - 本品は、【使用目的、効能又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - 本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前、使用後に破損、キズ及び液漏れ等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

【包装】

オムニバイト 2 枚箱入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社オムニコ
住所：〒294-0013
千葉県館山市宝貝182
：本社
〒104-0031
東京都中央区京橋1-6-12
電話番号：03-3564-0942
製造元：親和工業株式会社
発売元：株式会社ヨシダ
住所：〒110-8507
東京都台東区上野7-6-9
電話番号：03-3845-2931